


# Quali test eseguire?

## Allergia alla betulla

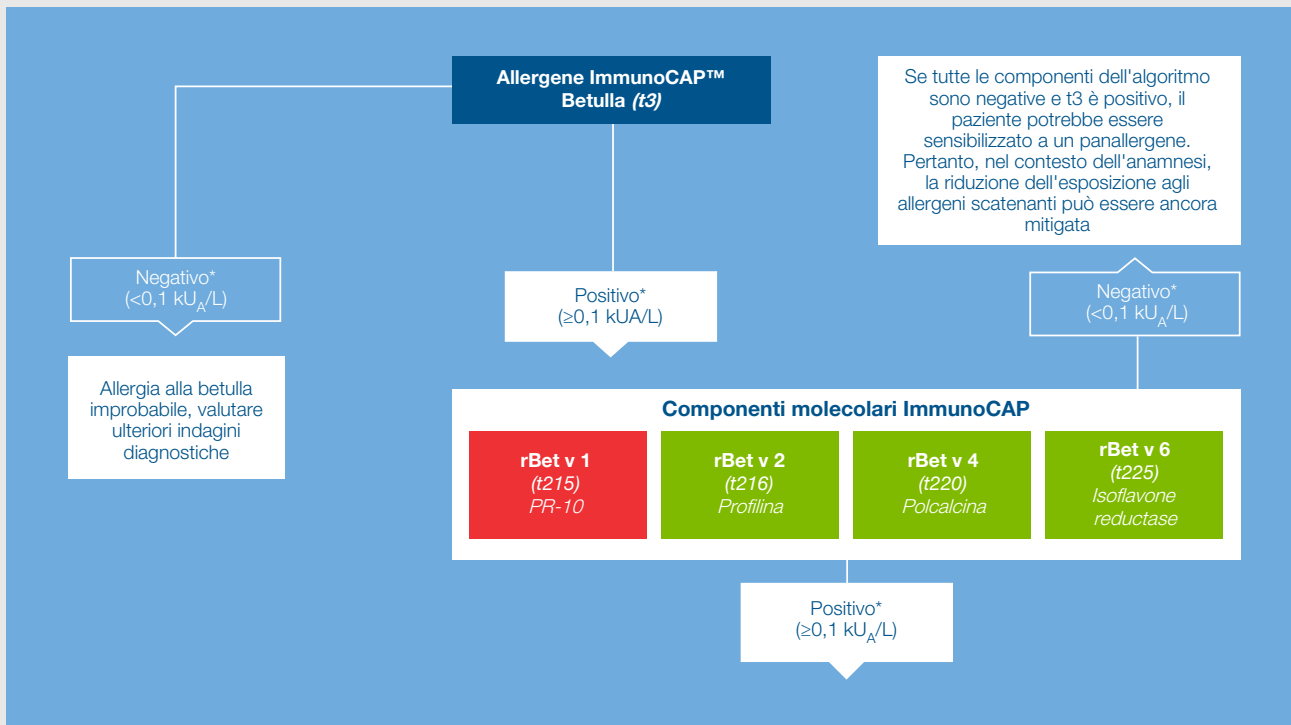

### INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

#### Allergia primaria - idonea per l'immunoterapia allergene-specifica<sup>64-75</sup>

- È probabile una sensibilizzazione primaria alla betulla
- Probabile cross-reattività con altri allergeni della famiglia delle PR-10, ad es., frutta, frutta a guscio, verdura

#### Considerazioni sulla gestione del paziente

- Riduzione dell'esposizione al polline di betulla
- Valuti la prescrizione di antistaminici mirati in prossimità della stagione di fioritura della betulla
- Valuti la prescrizione dell'immunoterapia allergene-specifica
- Valuti il rischio di reazione a frutta, frutta a guscio e verdura

#### Sensibilizzazione cross-reattiva<sup>64, 66-75</sup>

- Sensibilizzazione agli allergeni cross-reattivi minori – non idonea all'immunoterapia allergene-specifica

#### Considerazioni sulla gestione del paziente

- Riduzione dell'esposizione al polline di betulla
- Valutare antistaminici mirati in prossimità della stagione di fioritura della betulla
- Valuti ulteriori indagini per identificare l'allergene primario

\* I risultati devono essere interpretati nel contesto della storia clinica del paziente.

Allergene ImmunoCAP™ t3, Betulla  
 Allergene ImmunoCAP™ t215, Componente molecolare rBet v 1 PR-10, Betulla  
 Allergene ImmunoCAP™ t216, Componente molecolare rBet v 2 Profilina, Betulla  
 Allergene ImmunoCAP™ t220, Componente molecolare rBet v 4 Polcalcina, Betulla  
 Allergene ImmunoCAP™ t225, Componente molecolare rBet v 6 Isoflavone reductase, Betulla